




## Guía Técnica para Puentes y Coronas Temporales

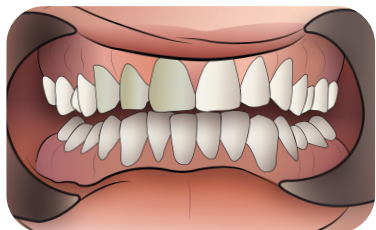


1. Pre-Trtamiento

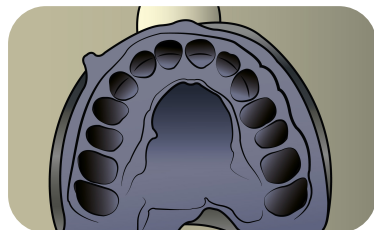

2. Tomar la impresión

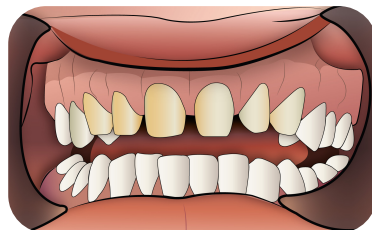


3. Preparar la dentina

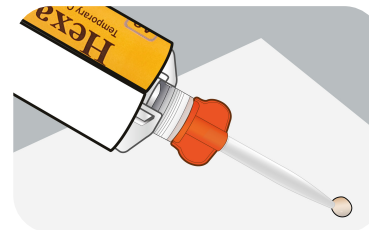


4. Expulsar una pequeña cantidad de HexaTemp a través de una punta mezcladora antes de aplicarlo en la matriz




5. Aplicar el HexaTemp en la matriz

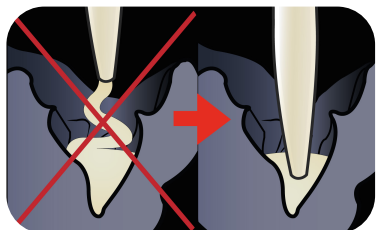


6. Asegurarse de llenar desde el fondo y matener siempre la punta mezcladora del HexaTemp para evitar grumos

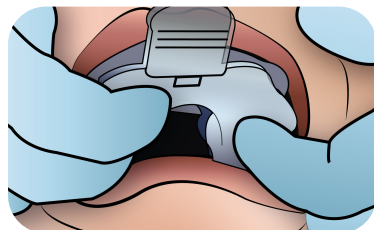


7. Colocar la matriz en la cavidad oral y sostenerla firmemente

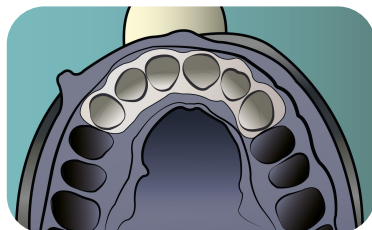


8. Retirar la matriz durante la fase elástica (dentro de los 30-60 segundos) desde el comienzo. Dejar el material en la matriz durante 5 minutos

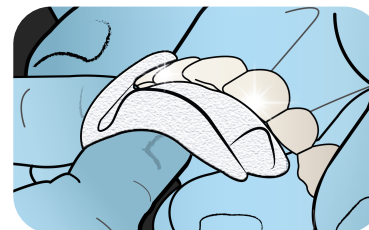


9. Utilizar Alcohol o Etanol para remover la capa de oxígeno inhibido

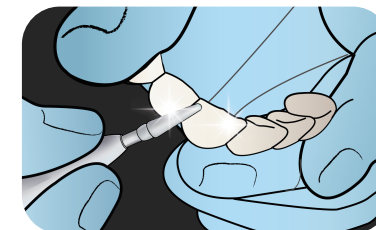

10. Recortar la superficie con fresas de carburo

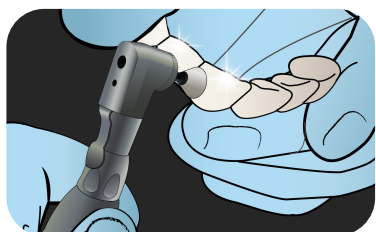


11. Pulir la superficie

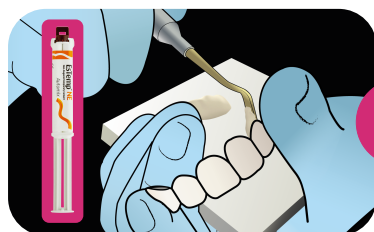

12-1. Utilizar Estemp NE para cementar la restauración provisional

OR

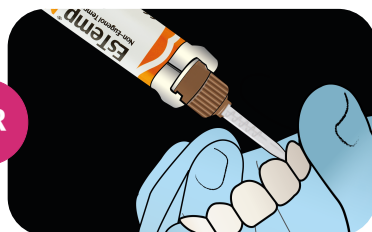

12-2. Utilizar Estemp NE con una punta mezcladora para cementar la restauración




13. Aplicar la corona temporal en la cavidad bucal




14. Post-Tratamiento


## Guía Técnica para Corona Unitaria

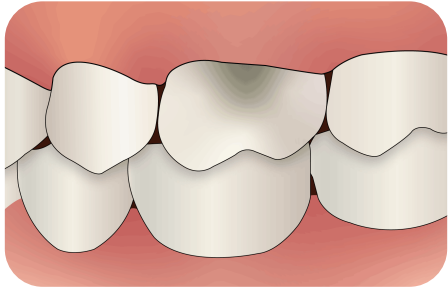


1. Pre-Trtamiento

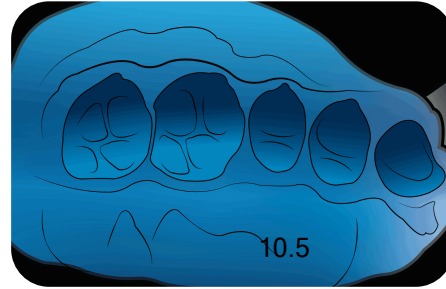


2. Tomar la impresión

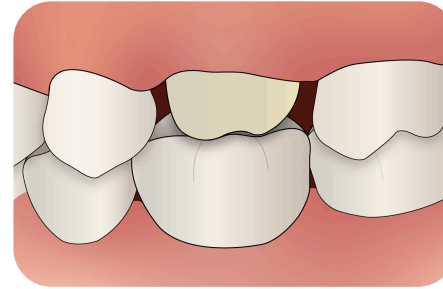


3. Preparar la dentina

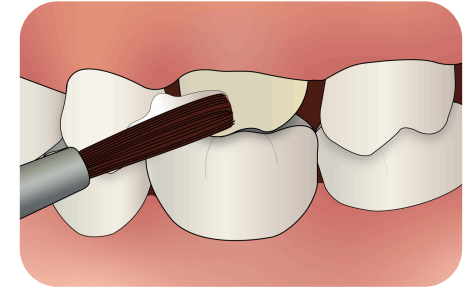


4. Aplicar separador

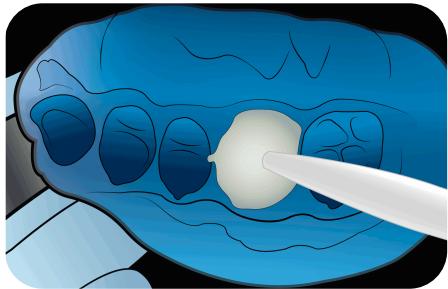


5. Aplicar el Hexatemp en la matriz

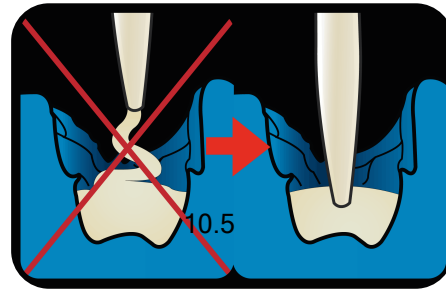

6. Asegurarse de llenar desde el fondo y matener siempre la punta mezcladora del HexaTemp para evitar grumos

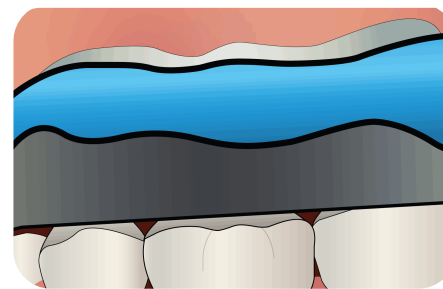


7. Colocar la matriz en la cavidad oral y sostenerla firmemente

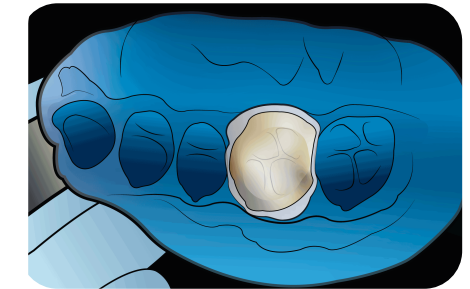

8. Retirar la matriz durante la fase elástica (dentro de los 30-60 segundos) desde el comienzo. Dejar el material en la matriz durante 5 inutos




9. Utilizar Estemp NE par cementar la restauració provisional

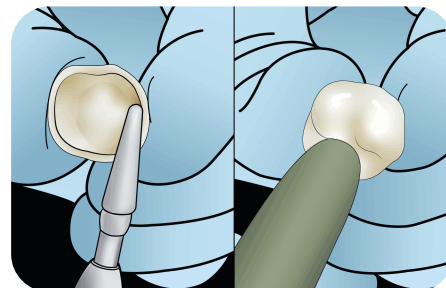

10. Recortar la superficie con fresas de carburo y pulir la superficie




11. Colocar la corona temporal utilizando Estemp NE

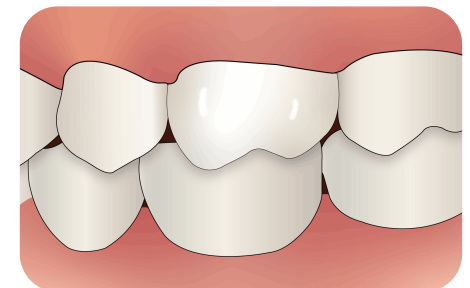


12. Post-Tratamiento


## Guía Técnica\_Técnica de grabado puntual para carillas provisionales

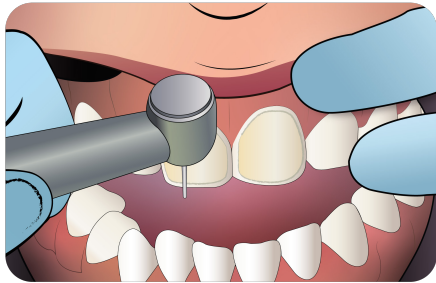

1. Pre-Trtamiento

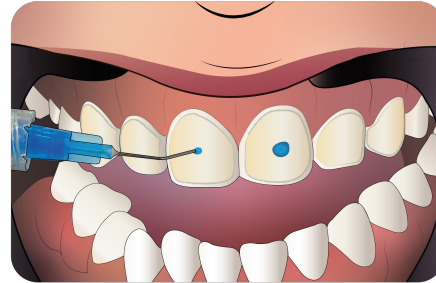

2. Aplicar grabado puntual

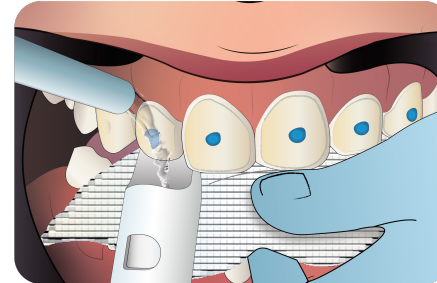

3. Enjuagar en agente grabador



4. Aplicar agente de unión puntual




5. Fotocurar durante 10 segundos




6. Aplicar HexaTemp en la cavidad bucal




7. Colocar la matriz en la cavidad bucal

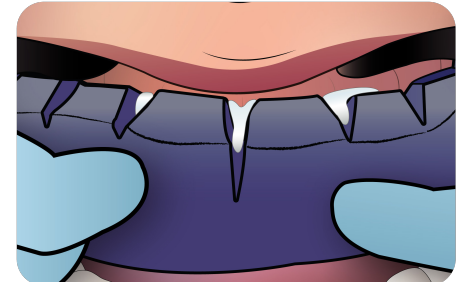

8. Sostener la matriz firmemente

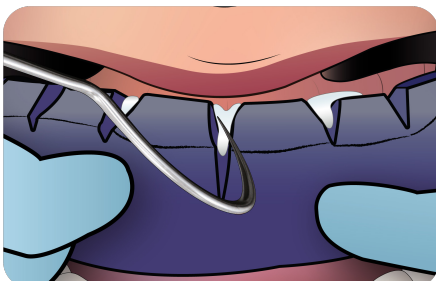


9. Remover el exceso de material de la matriz

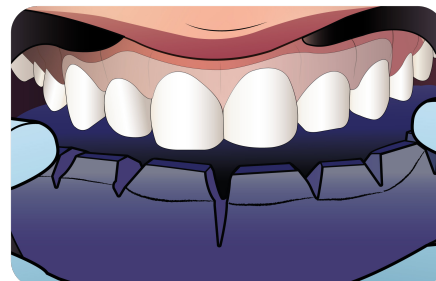

10. Retirar la matriz luego de 30-60 segundos desde el comienzo



11. Retirar el exceso de material de la encía. Utilizar Acohol o Ethanol para eliminar la capa de oxígeno inhibido

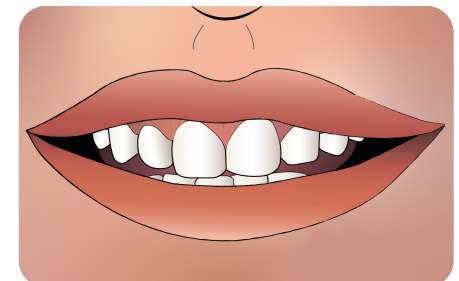

12. Post- Tratamiento